



УТВЕРЖДЕНО

Приказом заведующего МАДОУ

«Золотая рыбка»

№169 от 19.03.2020 г.

Правила

использования марлевых многоразовых масок работниками в период противоэпидемического режима

КОГДА НАДЕВАТЬ? Перед заступлением на смену.

КАК? Надевать маску следует так, чтобы она закрывала рот, нос, подбородок и плотно фиксировалась к лицу.

КАК ЧАСТО? Менять маску – 1 раз в 2 часа (или чаще). Если маска увлажнилась, ее следует заменить.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ маску сдают на стирку в прачечную. Повторное использование маски без обработки (дезинфекция, стирка, глажка) **запрещается**.

СТИРКА! Маски замачиваются в 0,015% «Ника-хлор» на 60 минут, после чего стирается с применением синтетических средств для стирки, сушатся и проглаживаются с двух сторон.

ПОМНИТЕ! В сочетании с тщательной гигиеной рук и карантинными мероприятиями маска максимально снизит заражение гриппом, коронавирусом и ОРВИ.

Правила

использования медицинских одноразовых масок работниками в период противоэпидемического режима

КОГДА НАДЕВАТЬ? Перед заступлением на смену.

КАК НАДЕВАТЬ? Надевать маску следует так, чтобы она закрывала рот, нос, подбородок и плотно фиксировалась. Если одна из сторон имеет цвет, то маску надевают белой стороной к лицу.

Специальные складки на маске надо развернуть, вшитую гибкую пластину в области носа следует плотно прижать к спинке носа для обеспечения более плотного прилегания к лицу.

КАК ЧАСТО? Менять маску – 1 раз в 2 часа (или чаще). Если маска увлажнилась, ее следует заменить.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ маску сразу выбрасывают. Медицинская маска используется однократно.

ПОМНИТЕ! В сочетании с тщательной гигиеной рук и карантинными мероприятиями маска максимально снизит заражение гриппом, коронавирусом и ОРВИ.